


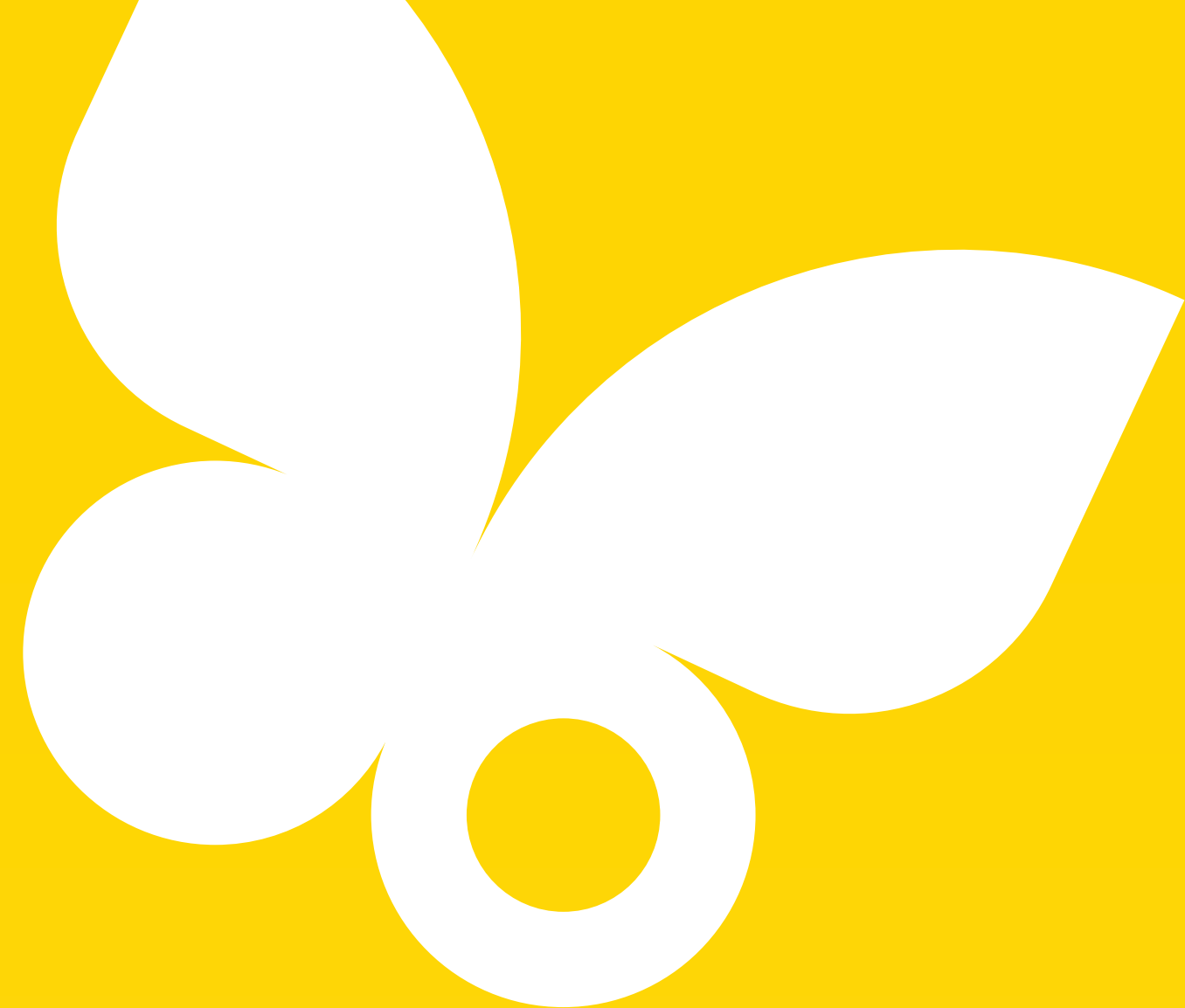


FreeStyle
Libre

LibreView

Aperçu de la glycémie en un seul clic grâce à une plateforme numérique intégrée FreeStyle Libre

Accès à distance aux tendances et modèles de glycémie
de vos patients pour des consultations plus éclairées.

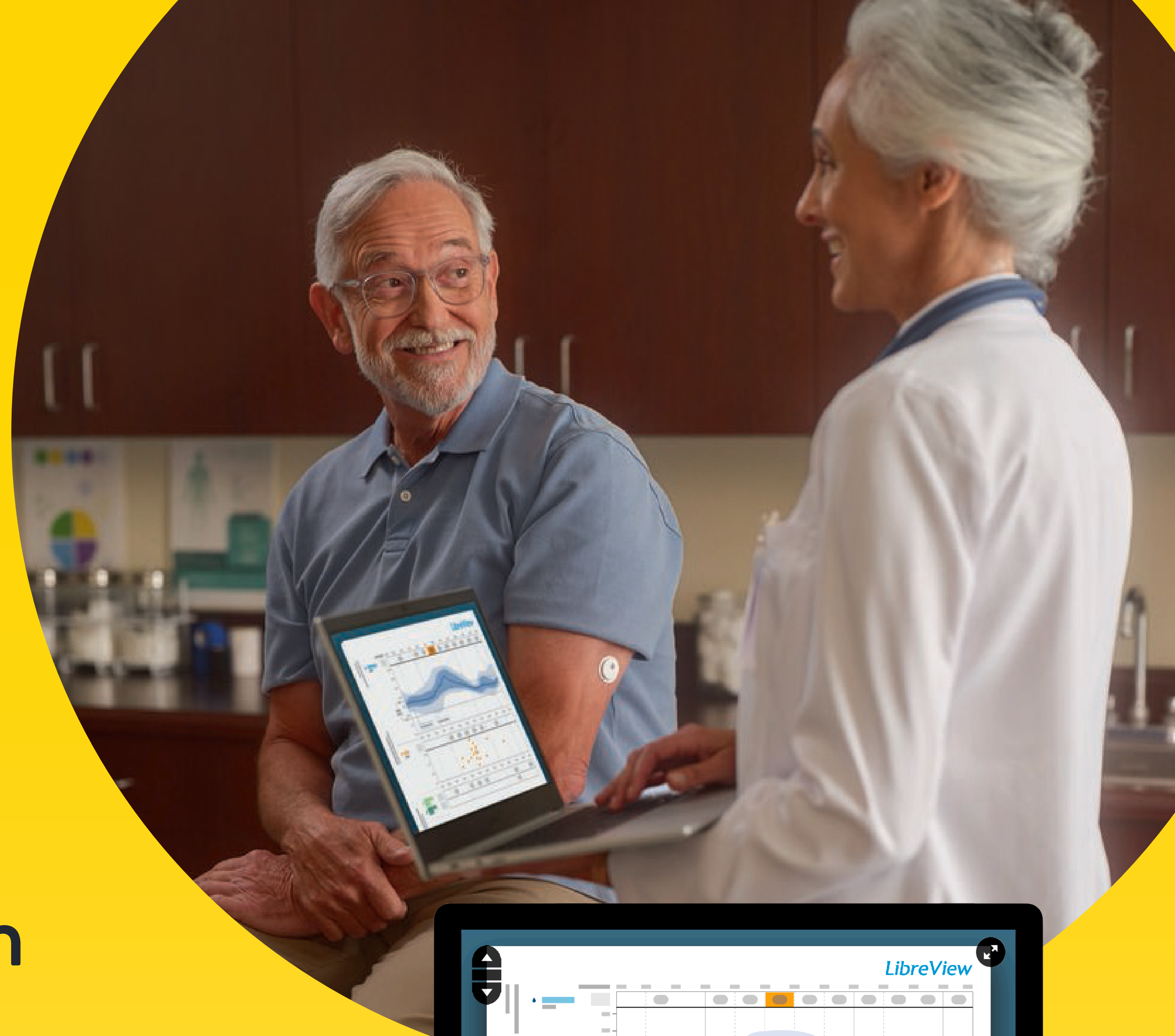

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 3 (lecteur FreeStyle Libre 3 ou appli FreeStyle Libre 3 utilisée avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus) est indiqué pour mesurer en continu les taux de glucose du liquide interstitiel des personnes de 2 ans et plus vivant avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Les applis des systèmes FreeStyle Libre sont seulement compatibles avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter la section Soutien de notre site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis des systèmes FreeStyle Libre nécessite l'inscription à LibreView.

Le logiciel de gestion des données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes qui vivent avec le diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une gestion efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions d'ordre thérapeutique ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.

Les images ne servent qu'à des fins de présentation. Données et patients fictifs.



Les patients peuvent vous transmettre leurs données de glycémie pour améliorer et faciliter les consultations en personne ou virtuelles



CONNECTEZ-VOUS À UNE CLINIQUE
à l'aide des applis des systèmes FreeStyle*

Transmission facile des données

Une fonction optionnelle de l'appli qui permet aux patients de transmettre facilement leurs données de glycémie à votre clinique avec LibreView†.



Optimisation du flux de travail

Les données de glycémie de vos patients sont automatiquement téléversées‡ dans LibreView, un système infonuagique sécurisé§.

* Les applis des systèmes FreeStyle Libre sont seulement compatibles avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter la section Soutien de notre site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis des systèmes FreeStyle Libre nécessite l'inscription à LibreView. † Le logiciel de gestion des données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes qui vivent avec le diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une gestion efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions d'ordre thérapeutique ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé. ‡ Le dispositif de l'utilisateur doit être doté d'une connexion Internet pour que les données de glucose puissent être enregistrées automatiquement dans LibreView. § LibreView a reçu la certification ISO27001/27018/27701 et la certification HITRUST CSF.

Aperçu des données de glycémie de vos patients, téléchargements faciles et accès à distance – tous offerts avec LibreView*

LibreView* est une plateforme infonuagique sécurisée† qui vous donne accès, à vous et à votre équipe de soins, aux rapports de glycémie de vos patients afin que vous puissiez prendre des décisions thérapeutiques plus éclairées.



Téléversements faciles

Examinez facilement les tendances de glycémie de vos patients grâce au téléversement automatique‡ des données de glycémie à partir des applis des systèmes FreeStyle Libre de vos patients.




Accès à distance

Optimisez votre flux de travail en ayant accès aux rapports les plus récents à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet.



Rapports faciles à consulter

Les rapports de glycémie sont conçus pour être faciles à comprendre et reflètent les recommandations d'experts pour vous aider à découvrir les modèles et tendances cachés.

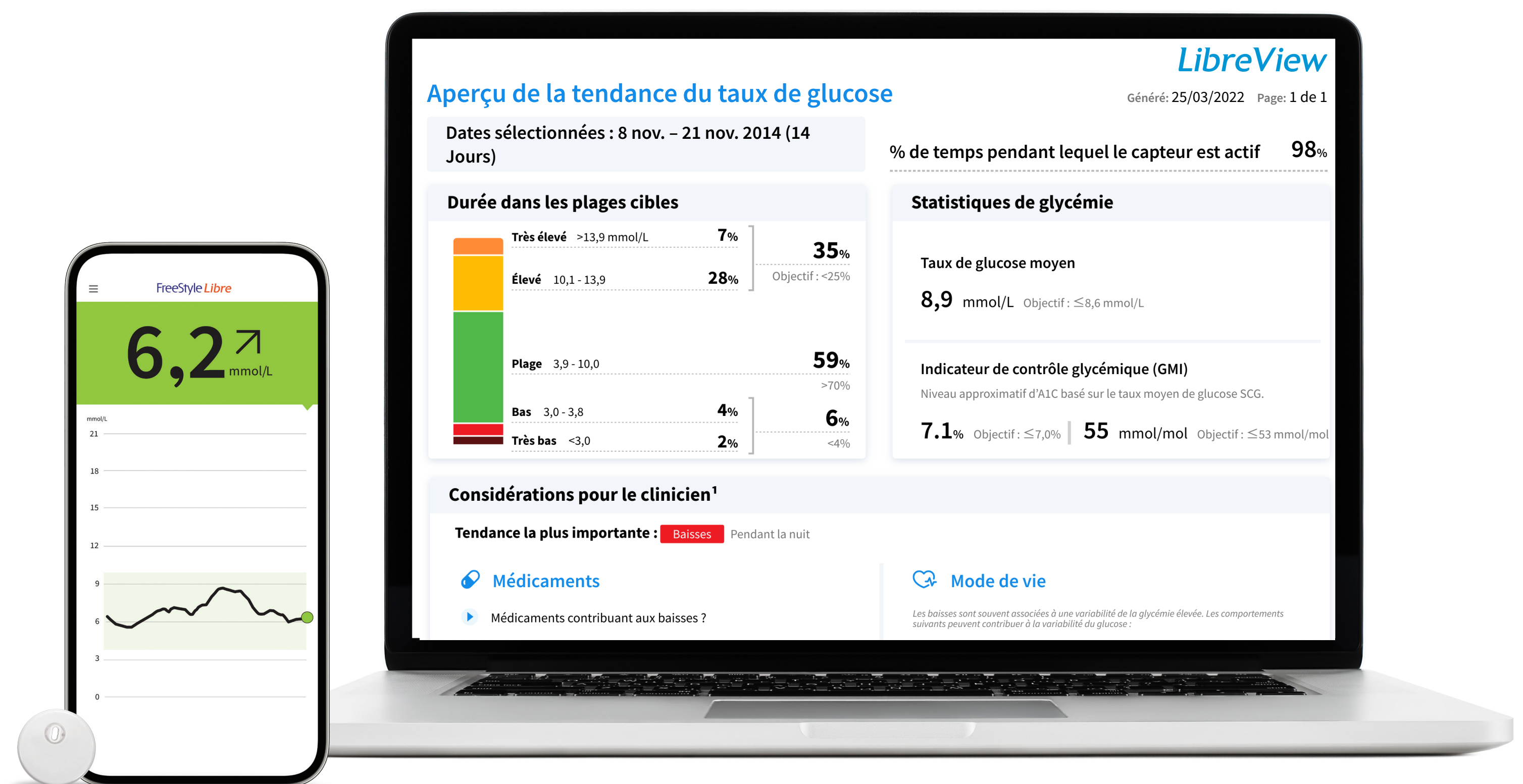

L'image ne sert qu'à des fins de présentation.

* Le logiciel de gestion des données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes qui vivent avec le diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une gestion efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions d'ordre thérapeutique ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé. † LibreView a reçu la certification ISO27001/27018/27701 et la certification HITRUST CSF.

‡ L'utilisation des applis des systèmes FreeStyle Libre nécessite l'inscription à LibreView. § Les applis des systèmes FreeStyle Libre sont seulement compatibles avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter la section Soutien de notre site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

Comment tirer le meilleur parti de LibreView

- Créez un compte professionnel LibreView et configurez une clinique virtuelle LibreView
- Établissez une connexion avec vos patients
- Générez des rapports d'historique de glycémie
- Collaborez avec votre équipe de soins

Le logiciel de gestion des données LibreView est destiné à la fois aux patients et aux professionnels de la santé pour aider des personnes qui vivent avec le diabète et leurs professionnels de la santé dans l'examen, l'analyse et l'évaluation des données historiques du lecteur de glucose afin de soutenir une gestion efficace du diabète. Le logiciel LibreView ne vise aucunement à fournir des décisions d'ordre thérapeutique ni à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.





Créez un compte professionnel LibreView pour commencer à utiliser LibreView

1 Créez un compte professionnel LibreView

2 Configurez une clinique virtuelle LibreView

3 Invitez les patients à transmettre leurs données

4 Optionnel : Ajoutez des membres à l'équipe de soins

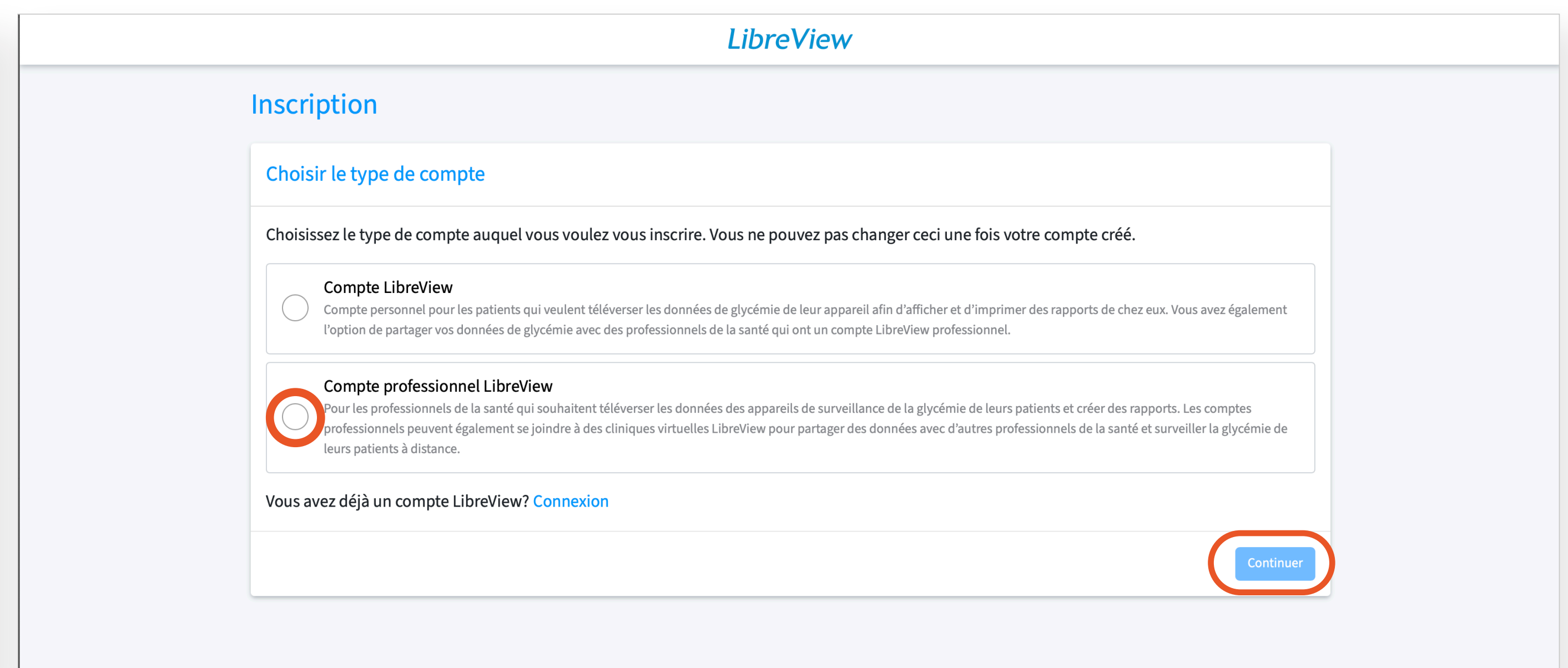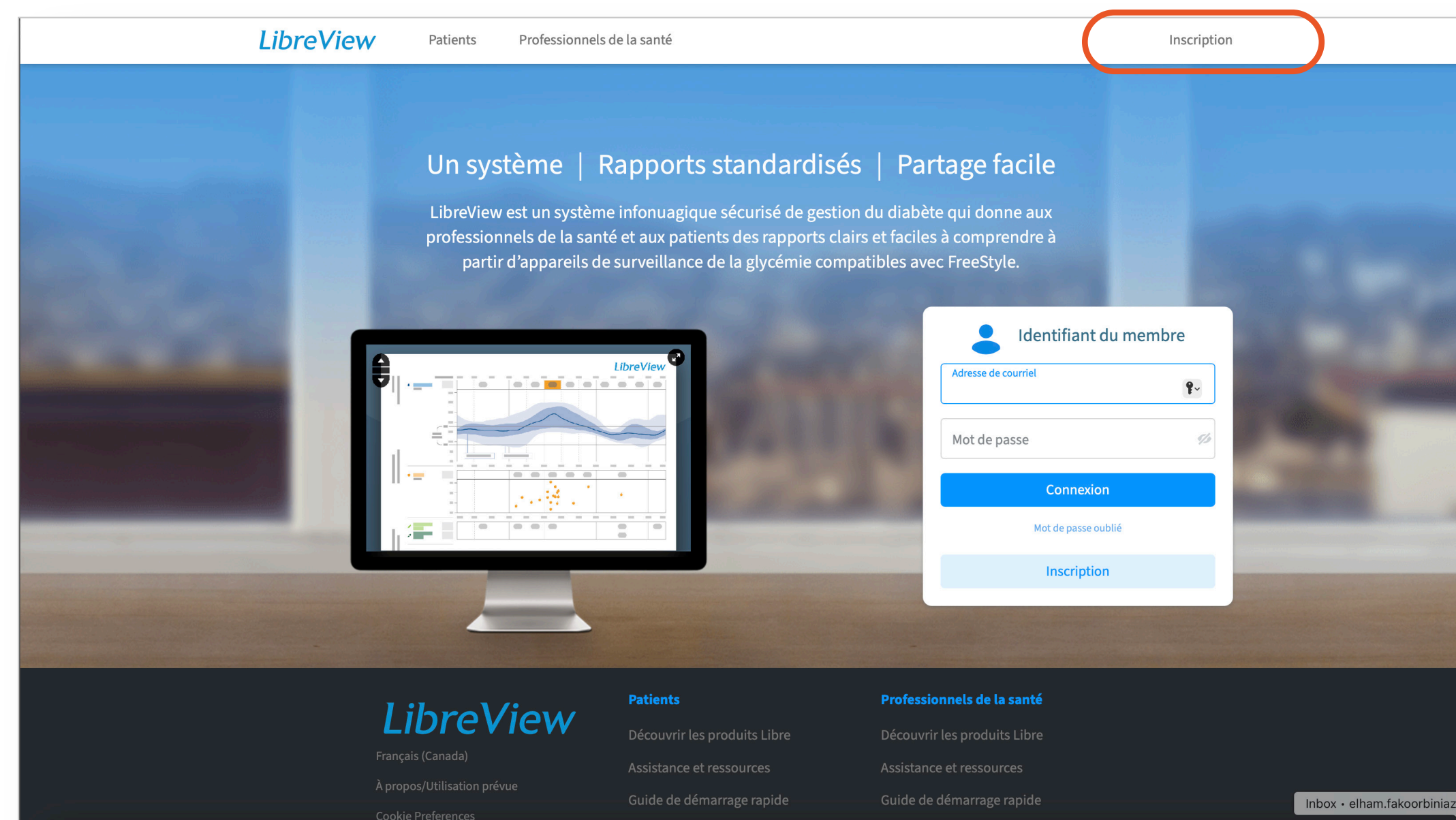

1. Cliquez sur **Inscription** dans la page d'accueil de LibreView.

2. Sélectionnez **Compte professionnel LibreView** et suivez les étapes d'inscription.

3. Vérifiez votre boîte de réception de courriels, trouvez le courriel de vérification de LibreView et cliquez sur le bouton **Vérifier le courriel**.


Créez votre clinique virtuelle LibreView pour ajouter des patients et collaborer avec des membres de l'équipe de soins

1 Créez un compte professionnel LibreView

2 Configurez une clinique virtuelle LibreView

3 Invitez les patients à transmettre leurs données

4 Optionnel : Ajoutez des membres à l'équipe de soins

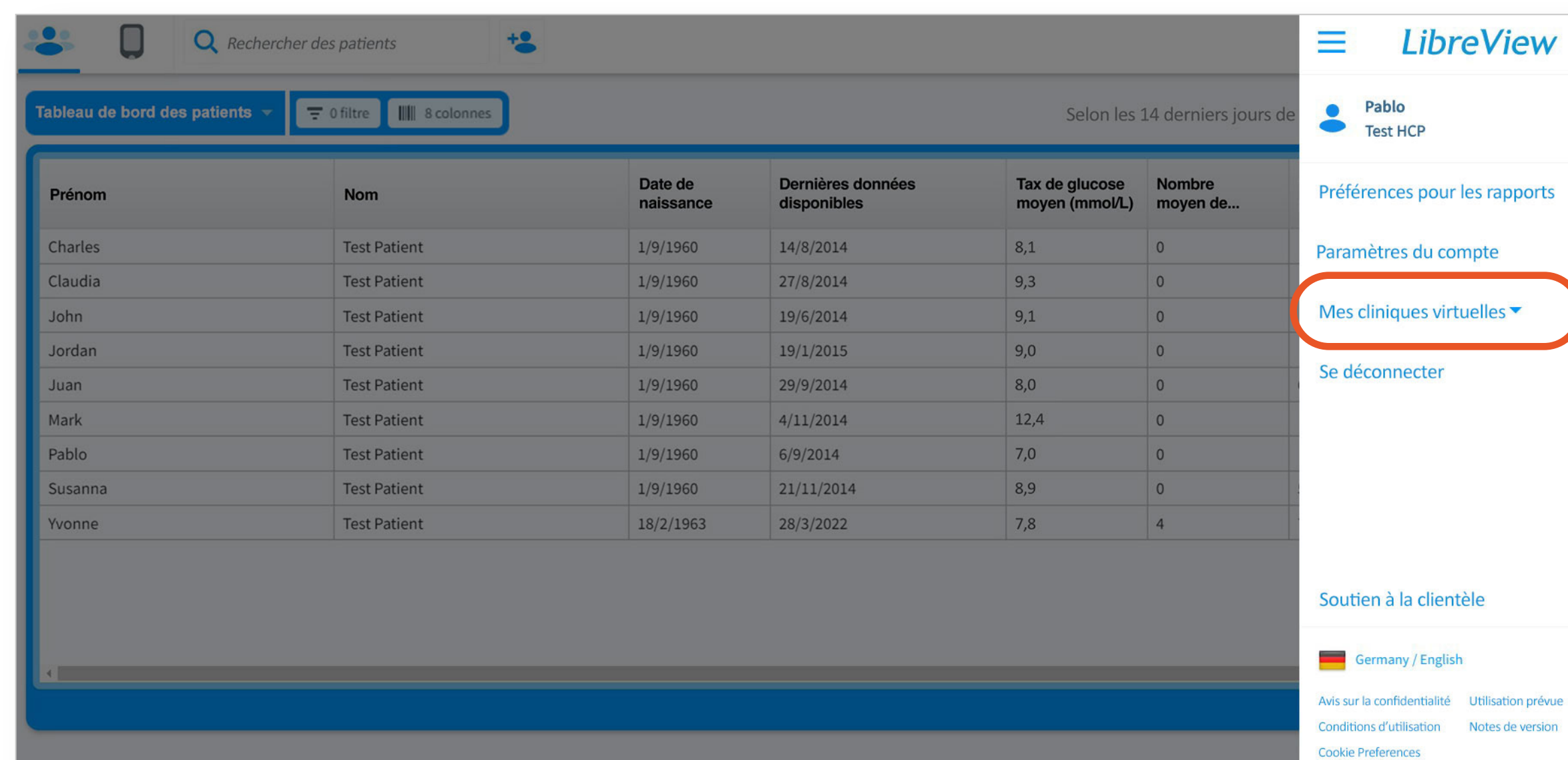

The screenshot shows the 'Créer une nouvelle clinique virtuelle' form in LibreView. The form includes fields for 'Nom de la clinique virtuelle', 'ID de la clinique virtuelle' (highlighted with a red circle), 'Adresse 1', 'Adresse 2 (facultatif)', 'Ville', 'État/province', 'Code postal', and 'Numéro de téléphone'. A red circle highlights the 'Créer une clinique' button at the bottom right.

1. Ouvrez le menu **Paramètres**, sélectionnez **Mes cliniques virtuelles** et appuyez sur **Créer une nouvelle clinique virtuelle**.

• Passez en revue la section **Aperçu** et appuyez sur **Continuer**.

2. Entrez les renseignements sur votre clinique ainsi que l'ID de la clinique virtuelle, puis appuyez sur **Créer une clinique**.



L'ID de la clinique virtuelle déjà entré peut être remplacé par un numéro plus facile à retenir, comme le numéro de téléphone de la clinique


Invitez les patients à se connecter à votre clinique et à transmettre leurs données de glycémie en utilisant l'identifiant de la clinique virtuelle et leurs applis FreeStyle Libre

1 Créez un compte professionnel LibreView


2 Configurez une clinique virtuelle LibreView

3 Invitez les patients à transmettre leurs données


Option 1 : Les patients se connectent par les applis FSL 2/FSL 3
Ou
Option 2 : Invitez les patients par courriel LibreView

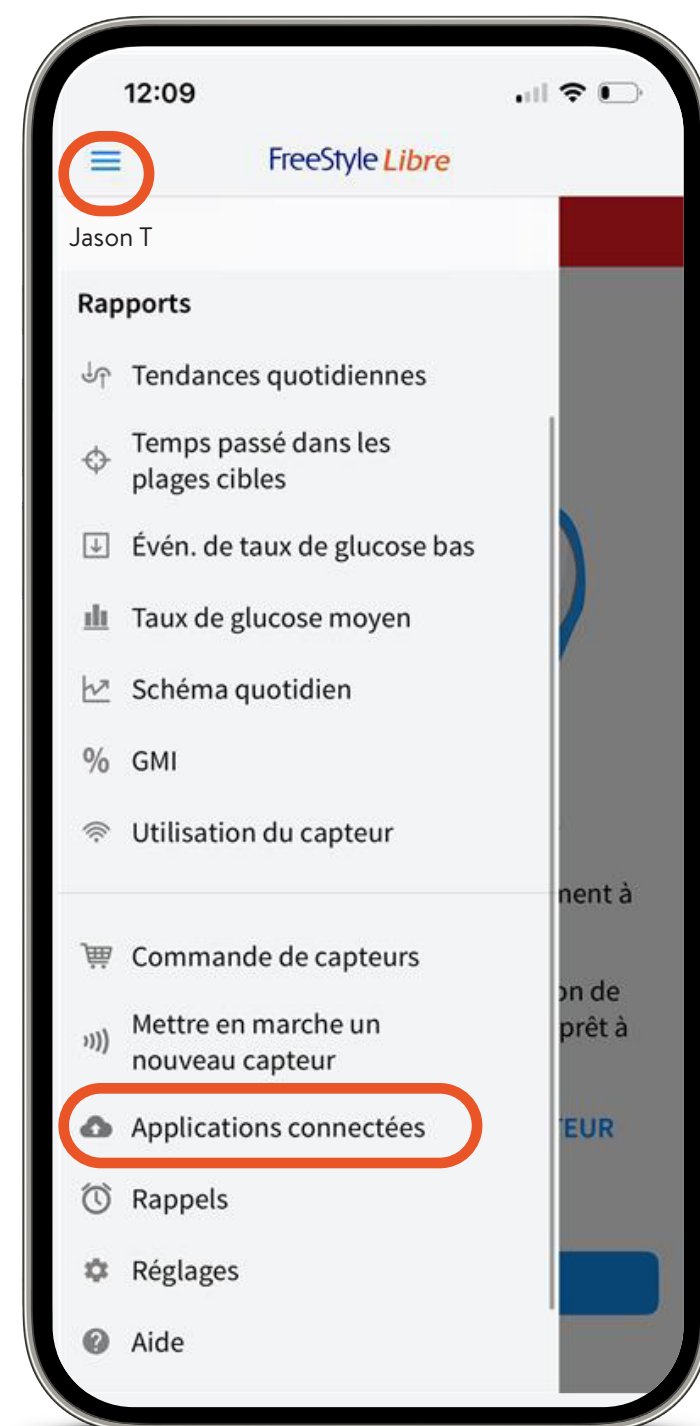


Étape 1
Cliquez sur Paramètres et Applications connectées

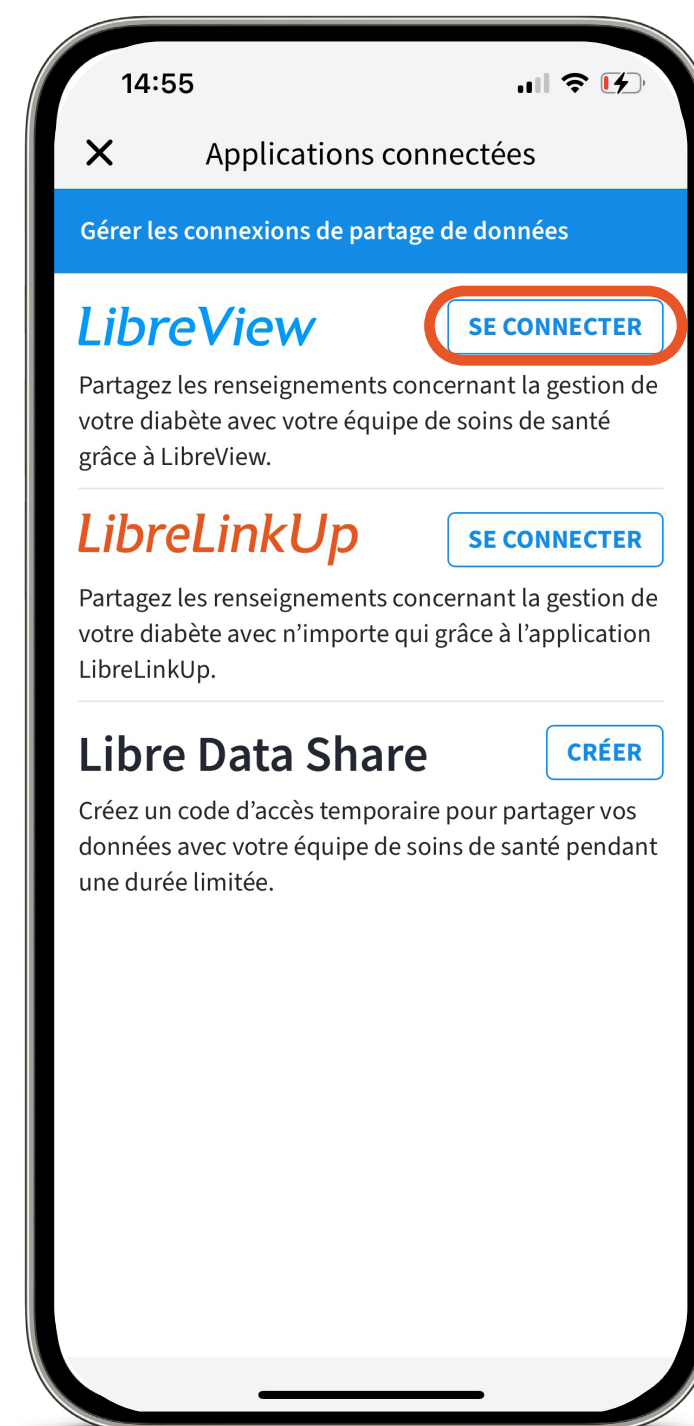


Étape 2
Cliquez sur Se connecter

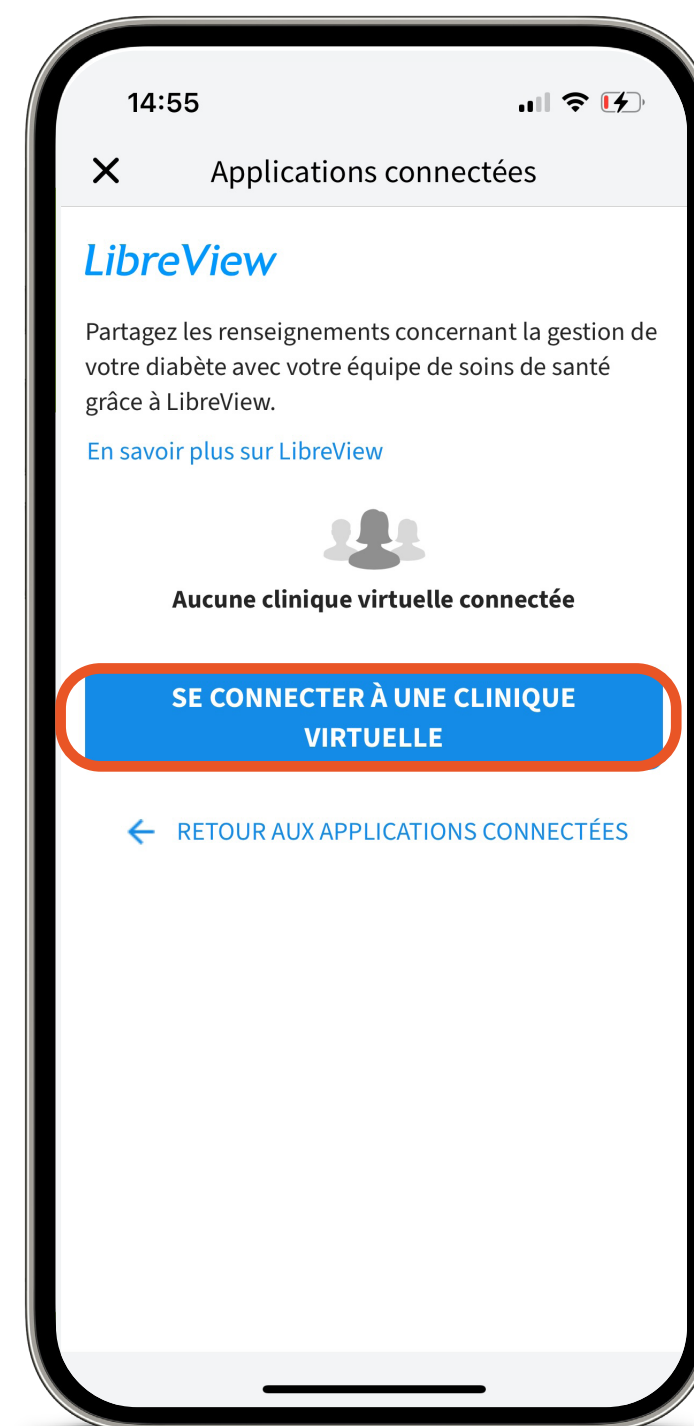


Étape 3
Cliquez sur Se connecter à une clinique virtuelle

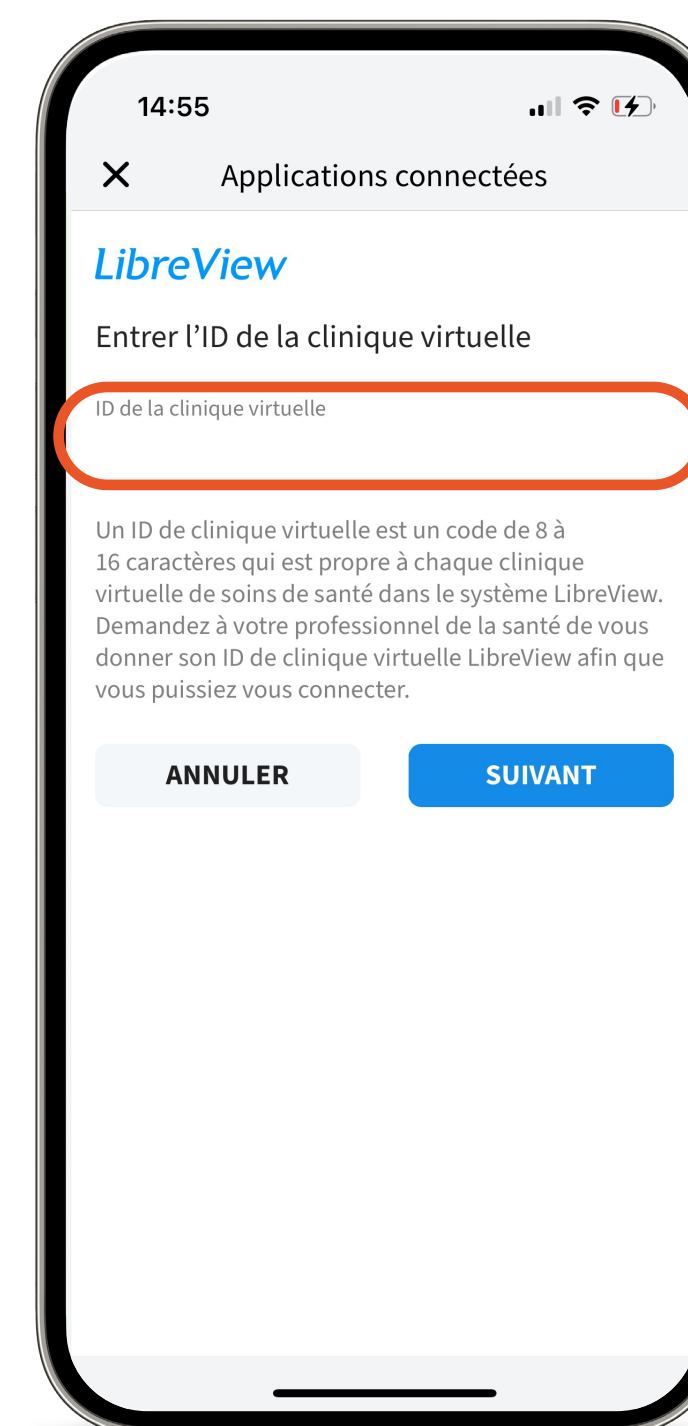

Étape 4
Entrez l'ID de la clinique virtuelle* fourni par le professionnel de la santé

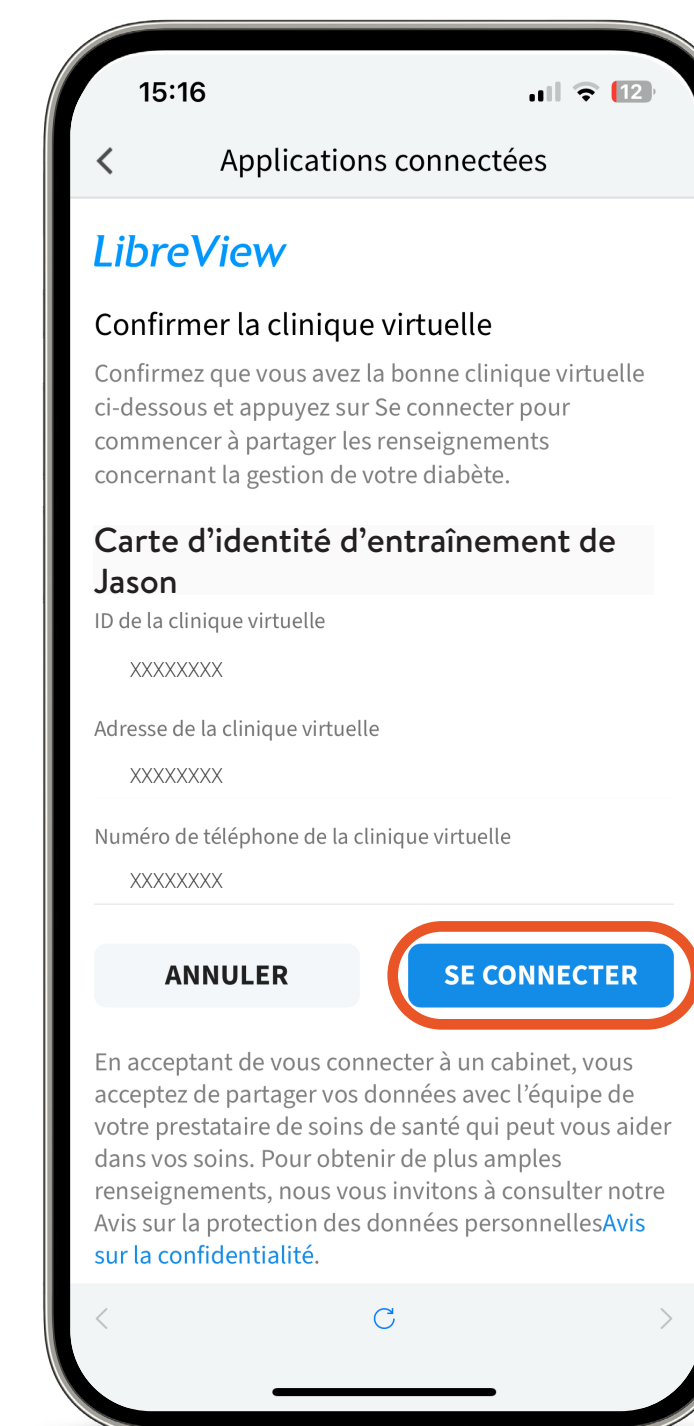

Étape 5
Vérifiez les renseignements sur la clinique et cliquez sur Se connecter

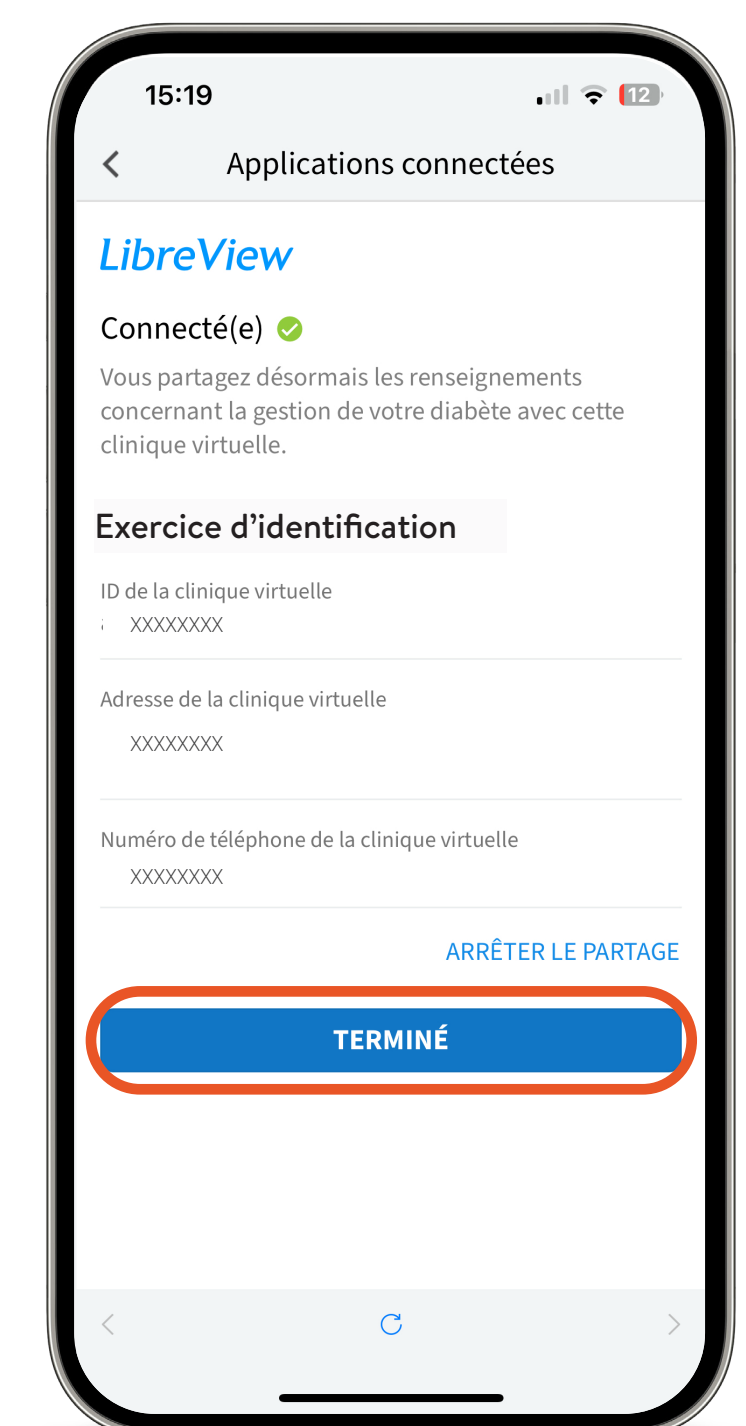

C'est fait!
Maintenant, vous transmettez vos données de glycémie

* Pour trouver l'identifiant de la clinique virtuelle dans LibreView, cliquez sur Paramètres -> Mes cliniques virtuelles -> « Votre clinique » -> Aperçu

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 3 (lecteur FreeStyle Libre 3 ou appli FreeStyle Libre 3 utilisée avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus) est indiqué pour mesurer en continu les taux de glucose du liquide interstitiel des personnes de 2 ans et plus vivant avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Les applis des systèmes FreeStyle Libre sont seulement compatibles avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter la section Soutien de notre site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis des systèmes FreeStyle Libre nécessite l'inscription à LibreView.

Envoyez aux **nouveaux patients** une invitation à se connecter à votre clinique virtuelle et à transmettre leurs données de glycémie

1 Créez un compte professionnel LibreView

2 Configurez une clinique virtuelle LibreView

3 Invitez les patients à transmettre leurs données

Option 1 : Les patients se connectent par les applis FSL 2/FSL 3
Ou
Option 2 : Invitez les patients par courriel LibreView

Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Taxe de glucose moyen (mmol/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

1. S'il n'y a pas de profil existant pour le patient, cliquez sur l'icône **Inviter des patients** dans la barre de navigation supérieure.

Inviter un patient

Prénom MI Nom

Date de naissance
Mois Sélectionnez le mois JJ AAAA

Lier le patient
Liez le patient à une clinique virtuelle LibreView ou faites-en un patient privé.
Clinique virtuelle Sélectionner cabinet

Compte LibreView
Invitez un patient à téléverser et à partager ses données de glycémie à distance.
Adresse de courriel

Annuler

2. Entrez le **prénom**, le **nom** et la **date de naissance** du patient, **sélectionnez la clinique** où il est invité et l'**adresse courriel** associée à son compte, puis cliquez sur **Enregistrer**.

3. Le patient recevra une invitation en attente dans son appli. Lorsque le patient aura appuyé sur **Invitation en attente** et **Accepter**, la transmission de données à votre clinique commencera.


Optionnel : Ajouter des membres à l'équipe de soins pour qu'ils puissent consulter eux-mêmes les données de glycémie des patients

1 Créez un compte professionnel LibreView

2 Configurez une clinique virtuelle LibreView


3 Invitez les patients à transmettre leurs données

4 Optionnel : Ajoutez des membres à l'équipe de soins

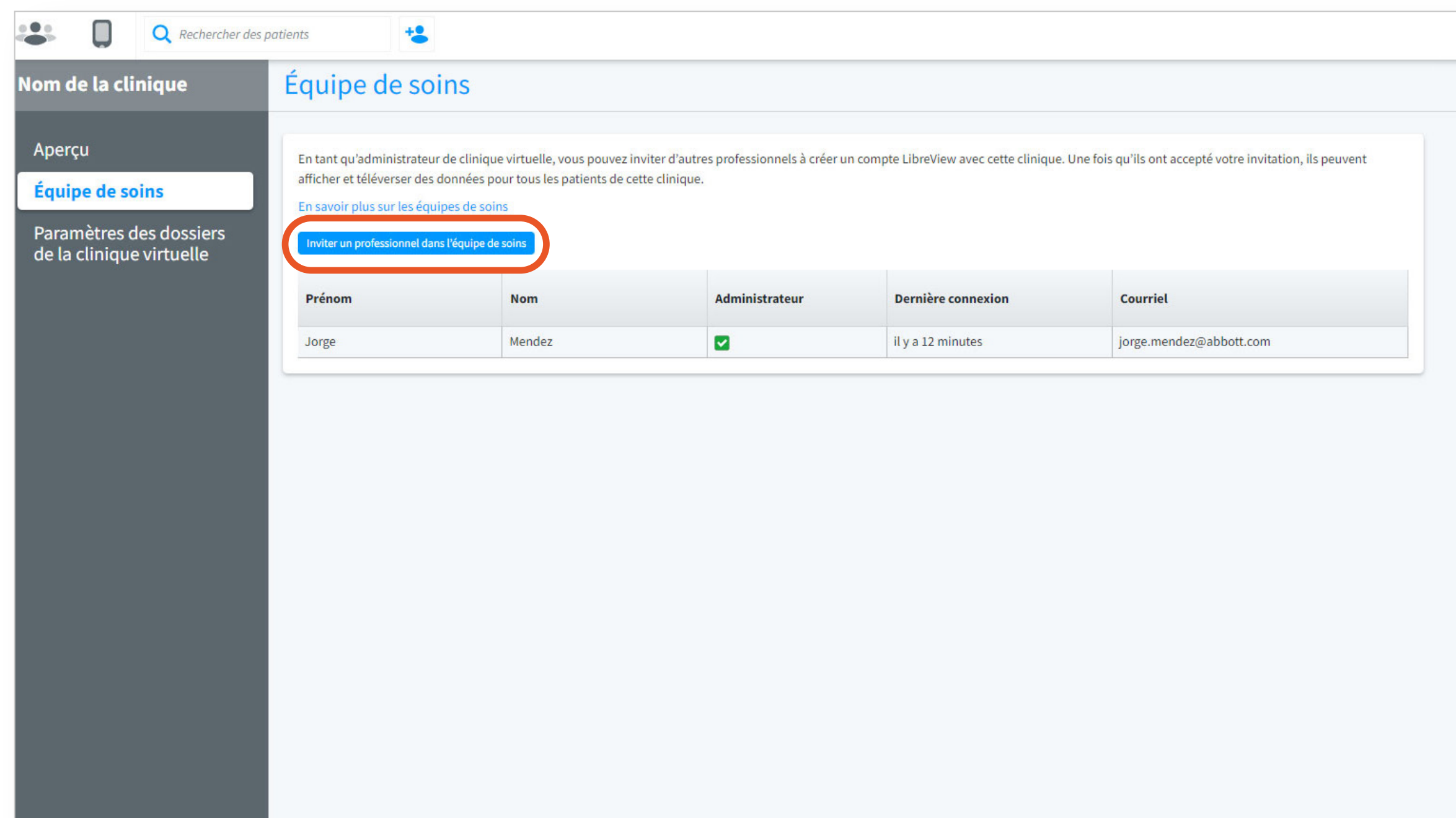

1. Ouvrez l'onglet **Équipe de soins** dans votre clinique pour inviter des membres de votre clinique à accéder à LibreView.

- Sélectionnez Inviter un **professionnel dans l'équipe de soins**.

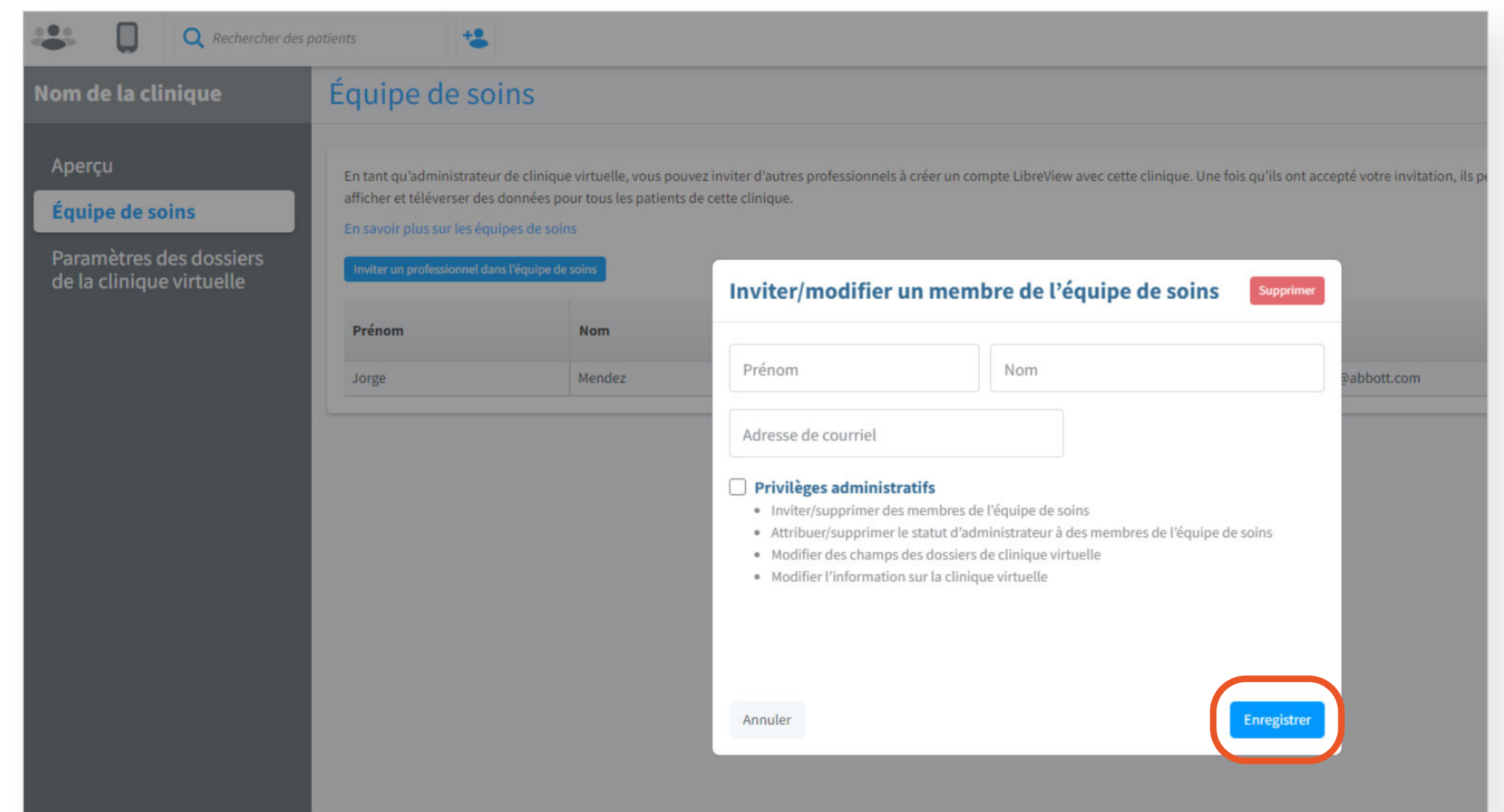


2. Entrez le prénom, le nom et l'adresse courriel du membre de votre équipe de soins et, si cela est applicable, cochez la case permettant d'activer les Privilèges d'administrateur, puis appuyez sur **Enregistrer**.

L'invité recevra un courriel d'invitation à se joindre à votre clinique virtuelle LibreView. S'il possède déjà un compte LibreView, il peut simplement se connecter et accepter l'invitation à se joindre à votre clinique.



C'est une bonne idée d'accorder des privilèges d'administrateur à au moins deux membres de l'équipe de soins

Téléverser les données des systèmes FreeStyle Libre

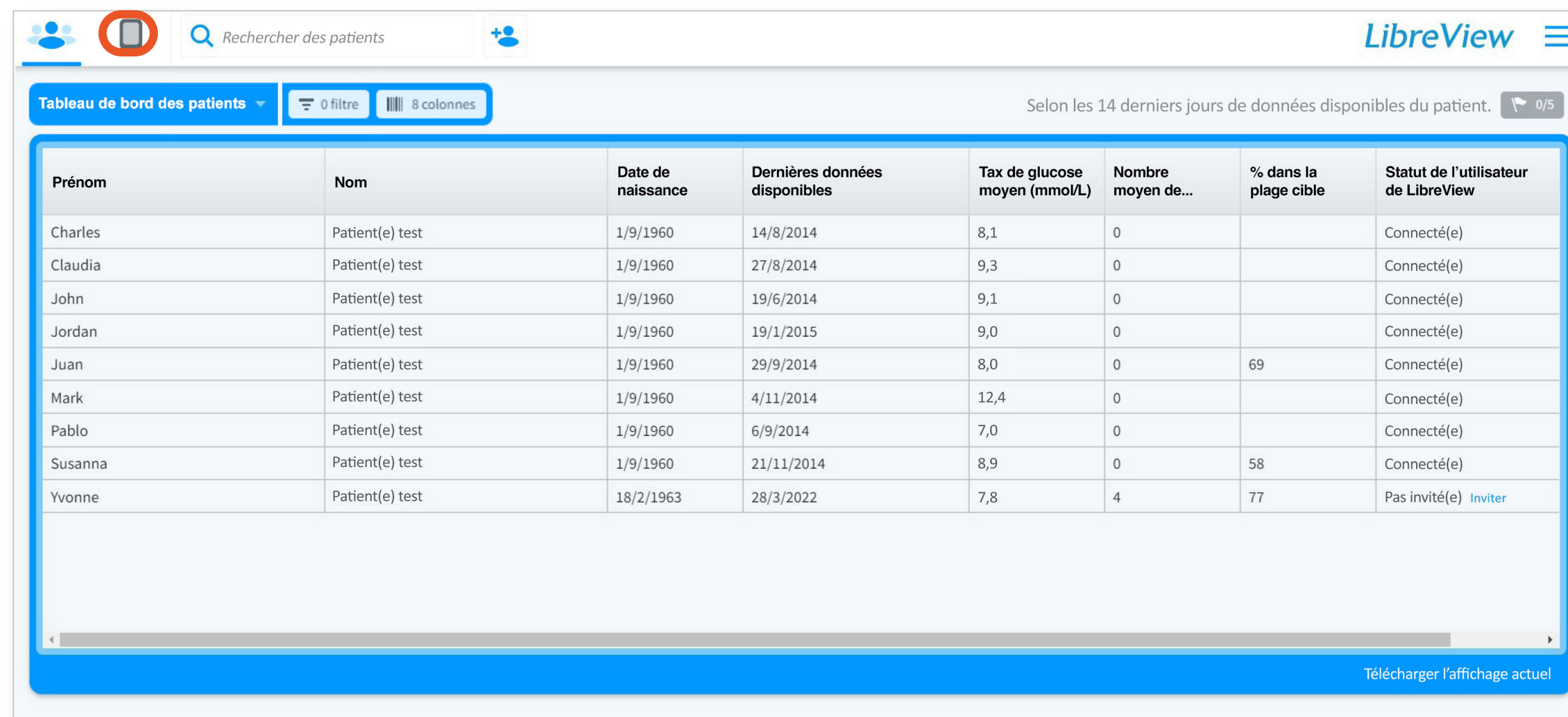


The screenshot shows the LibreView interface with a patient dashboard. At the top, there's a search bar labeled 'Rechercher des patients' and a 'LibreView' logo. Below the search bar, there's a 'Tableau de bord des patients' section with filters for '0 filtre' and '8 colonnes'. A note indicates 'Selon les 14 derniers jours de données disponibles du patient.' and a '0/5' status. The main table lists patient information:

Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Taux de glucose moyen (mmol/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

At the bottom right, there's a link to 'Télécharger l'affichage actuel'.

1. Cliquez sur l'icône **Téléverser l'appareil** sur la page d'accueil de la clinique.

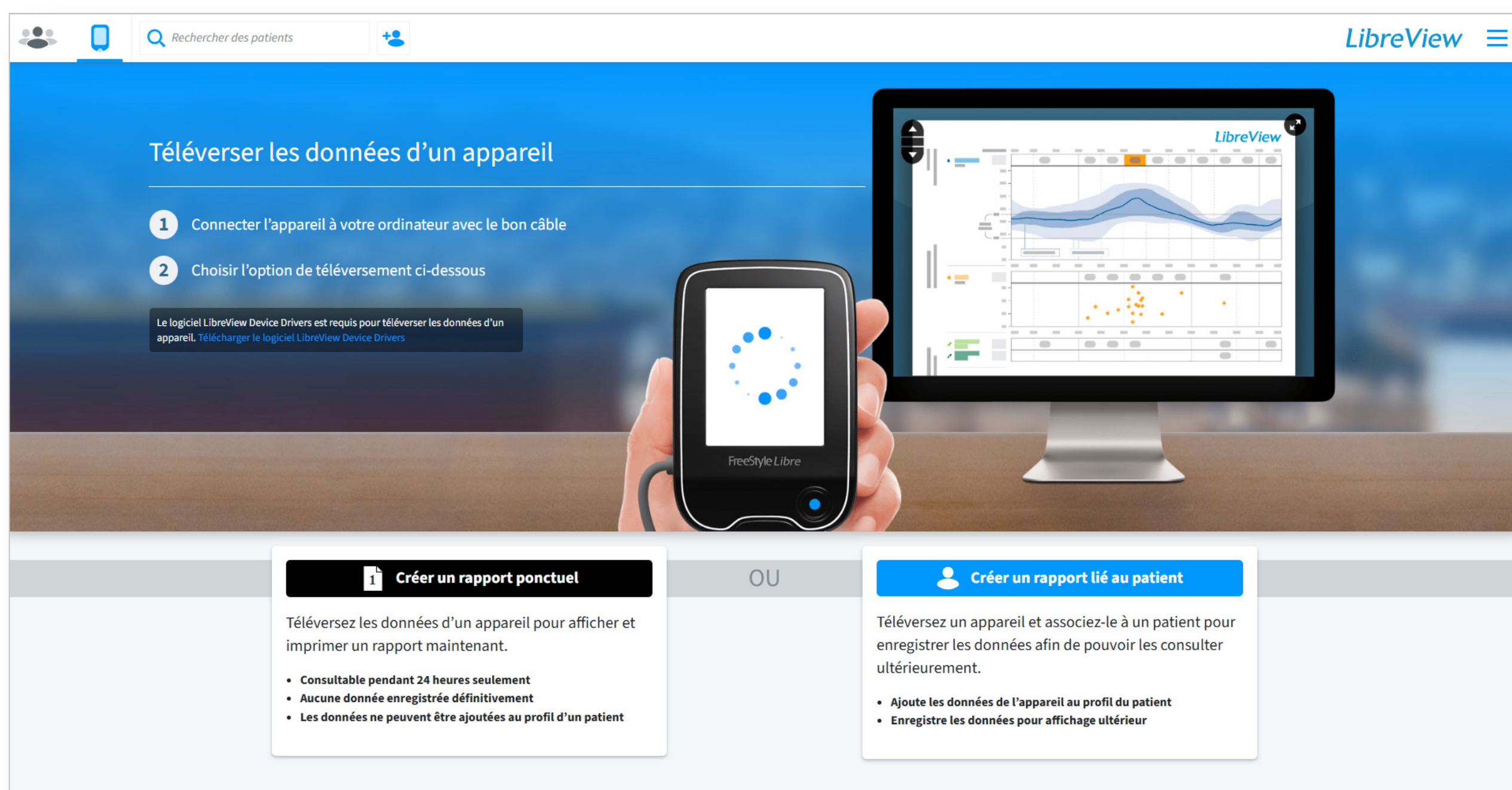

The screenshot shows the 'Téléverser les données d'un appareil' page in LibreView. It includes a list of steps: 1. Connecter l'appareil à votre ordinateur avec le bon câble, 2. Choisir l'option de téléversement ci-dessous. A note mentions that LibreView Device Drivers software is required. Below the steps, there are two options: 'Créer un rapport ponctuel' and 'Créer un rapport lié au patient', separated by 'OU'. The 'Créer un rapport ponctuel' option includes details about data availability (24 hours only, not permanent, not added to patient profile). The 'Créer un rapport lié au patient' option includes details about associating the device with a patient and registering data for future use.

2. Connectez le lecteur à un ordinateur.

3. Sélectionnez **Créer un rapport ponctuel** OU **Créer un rapport lié au patient**.

4. Installez les pilotes des appareils LibreView, au besoin.

Générer des rapports pour consulter tout le profil glycémique de votre patient

LibreView

Rechercher des patients


Tableau de bord des patients

Selon les 14 derniers jours de données disponibles du patient.


Prénom	Nom	Date de naissance	Dernières données disponibles	Taux de glucose moyen (mmol/L)	Nombre moyen de...	% dans la plage cible	Statut de l'utilisateur de LibreView
Charles	Patient(e) test	1/9/1960	14/8/2014	8,1	0		Connecté(e)
Claudia	Patient(e) test	1/9/1960	27/8/2014	9,3	0		Connecté(e)
John	Patient(e) test	1/9/1960	19/6/2014	9,1	0		Connecté(e)
Jordan	Patient(e) test	1/9/1960	19/1/2015	9,0	0		Connecté(e)
Juan	Patient(e) test	1/9/1960	29/9/2014	8,0	0	69	Connecté(e)
Mark	Patient(e) test	1/9/1960	4/11/2014	12,4	0		Connecté(e)
Pablo	Patient(e) test	1/9/1960	6/9/2014	7,0	0		Connecté(e)
Susanna	Patient(e) test	1/9/1960	21/11/2014	8,9	0	58	Connecté(e)
Yvonne	Patient(e) test	18/2/1963	28/3/2022	7,8	4	77	Pas invité(e) Inviter

Télécharger l'affichage actuel

1. Sélectionnez le nom du patient et consultez son historique de glycémie.

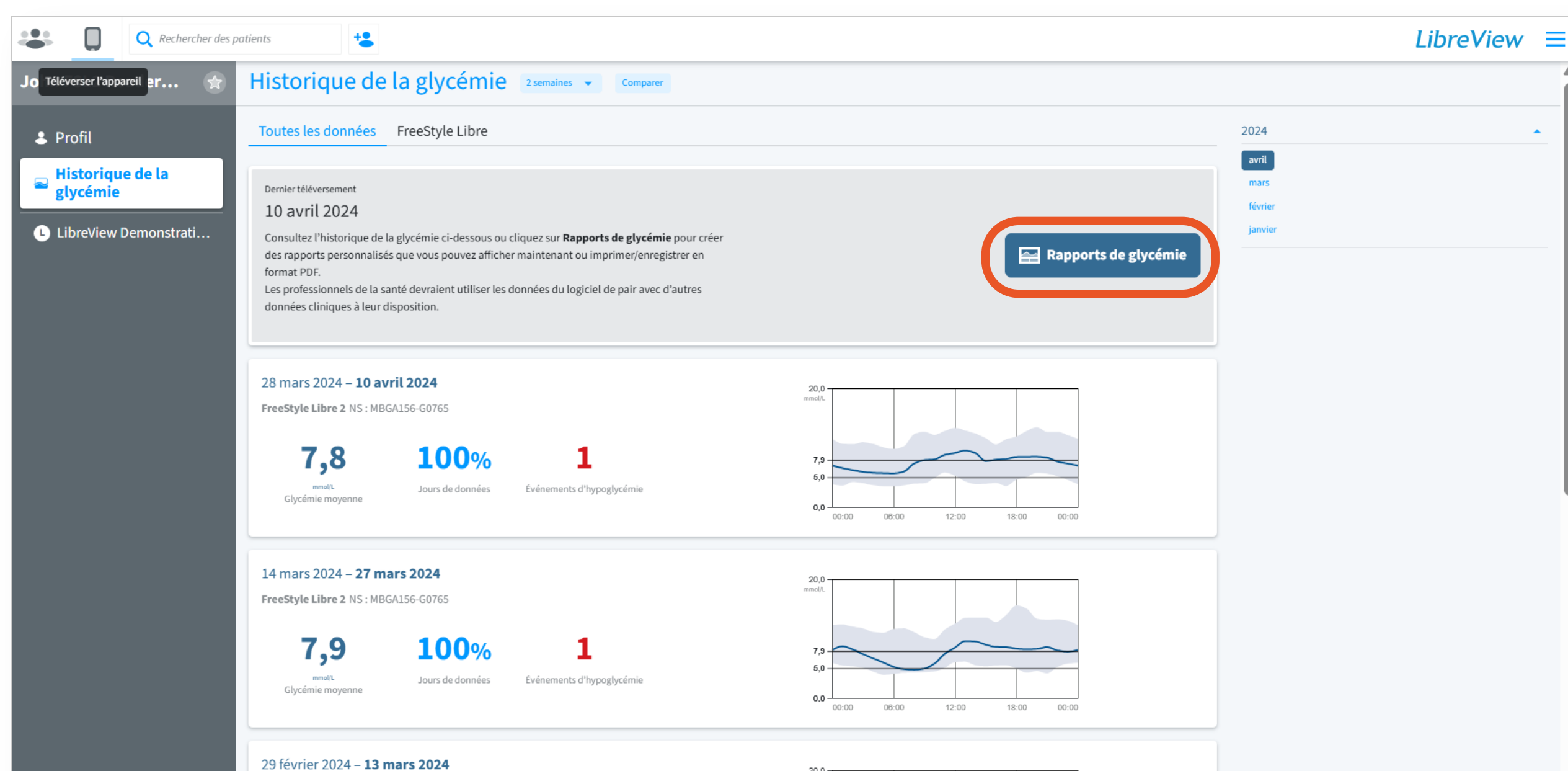

2. Appuyez sur le bouton **Rapports de glycémie** dans la fenêtre **Historique de la glycémie** pour créer des rapports que vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger.

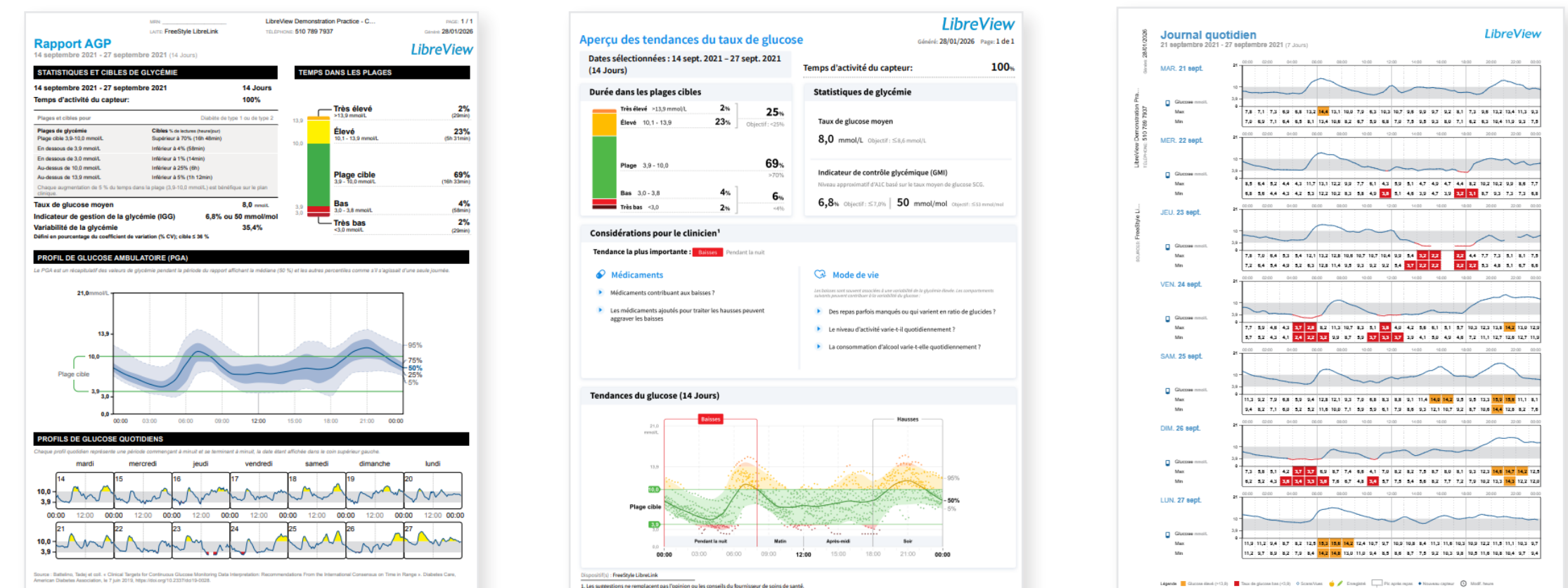



Aidez les patients à télécharger, à paramétrer et à transmettre des données sur les applis des systèmes FreeStyle Libre* dès aujourd'hui



Téléversements faciles

Examinez facilement les tendances de glycémie de vos patients grâce au téléversement automatique[†] des données de glycémie à partir des applis des systèmes FreeStyle Libre de vos patients[†].



Accès à distance

Optimisez votre flux de travail en ayant accès aux rapports les plus récents à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet.




Rapports faciles à consulter

Découvrez les modèles et tendances de glycémie en consultant des rapports conçus pour être faciles à comprendre et qui reflètent les recommandations d'experts.



Besoin d'aide?

Composez dès maintenant le 1-800-393-6645 ou visitez **LibreView.com/support** pour en savoir plus

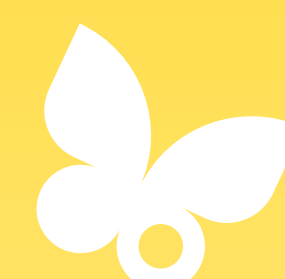

LibreView



Abbott

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 3 (lecteur FreeStyle Libre 3 ou appli FreeStyle Libre 3 utilisée avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus) est indiqué pour mesurer en continu les taux de glucose du liquide interstitiel des personnes de 2 ans et plus vivant avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

† Les applis des systèmes FreeStyle Libre sont seulement compatibles avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter la section Soutien de notre site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis des systèmes FreeStyle Libre nécessite l'inscription à LibreView.

© 2026 Abbott. FreeStyle, Libre et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. ADC-122874-F v1.0